

## Simple, confiable y rápido desprendimiento electrolítico con feedback en tiempo real

- **Coloque** el sistema de desprendimiento NumenFR™ sobre la parte proximal de la microguía hasta que el **indicador de sistema listo** se ilumine en verde y suene un pitido corto.
- **Presione** el **botón de desprendimiento** para activarlo.
- **Observe** el **indicador de estado** - una luz verde intermitente indica un desprendimiento en proceso - durante 5 a 10 segundos hasta que se encienda una luz verde fija con 3 pitidos cortos o 1 pitido largo.
- **Confirme** el desprendimiento exitoso bajo fluoroscopia y extraiga el sistema de desprendimiento NumenFR™.

Descripción	Catálogo de producto
NumenFR™ Detachment System	E101



Precaución: no utilice sistemas de desprendimiento que no sean NumenFR™

## Modos del indicador NumenFR™ y acciones sugeridas



INDICACIÓN	MODO	ACCIONES SUGERIDAS
OK VERDE FIJO 1 PITIDO CORTO	Listo para el desprendimiento	Presione el botón de desprendimiento
✓ VERDE INTERMITENTE	Desprendimiento en progreso	Espere el desprendimiento
✓ VERDE SOLIDO 3 PITIDOS CORTOS / 1 PITIDO LARGO	Ciclo de desprendimiento completo	Confirme el desprendimiento exitoso bajo fluoroscopia. Si el coil no se libera, repita el procedimiento de desprendimiento
OK OFF	Error de conexión	Retire el NumenFR™ y colóquelo sobre la microguía nuevamente
AMARILLO INTERMITENTE	Batería baja	Reemplace la unidad NumenFR™
OK ✓ AMARILLO INTERMITENTE PITIDOS CORTOS CONTINUOS	Error de batería	
OK ✓ AMARILLO INTERMITENTE PITIDOS CORTOS CONTINUOS	Error del sistema	
OK AMARILLO INTERMITENTE PITIDOS CORTOS CONTINUOS	Cortocircuito en la guía del coil	Reemplace el Coil Numen